



EXOCAD · KÜTÜPHANE KURULUMU

MitImplant V2.0.0 Kütüphane Kurulum Talimatı


Kütüphaneyi Exocad'e doğru şekilde kurmak için aşağıdaki üç adımı sırasıyla uygulayın.

1

ADIM 1

Arşivi açın ve içeriği kontrol edin

MitImplant V2.0.0.rar arşivinin içinde **implant** ve **modelcreator** kütüphaneleri bulunmaktadır. Arşivi çıkardığınızda MitImplant V2.0.0 klasörünün içinde bu iki klasörü göreceksiniz.

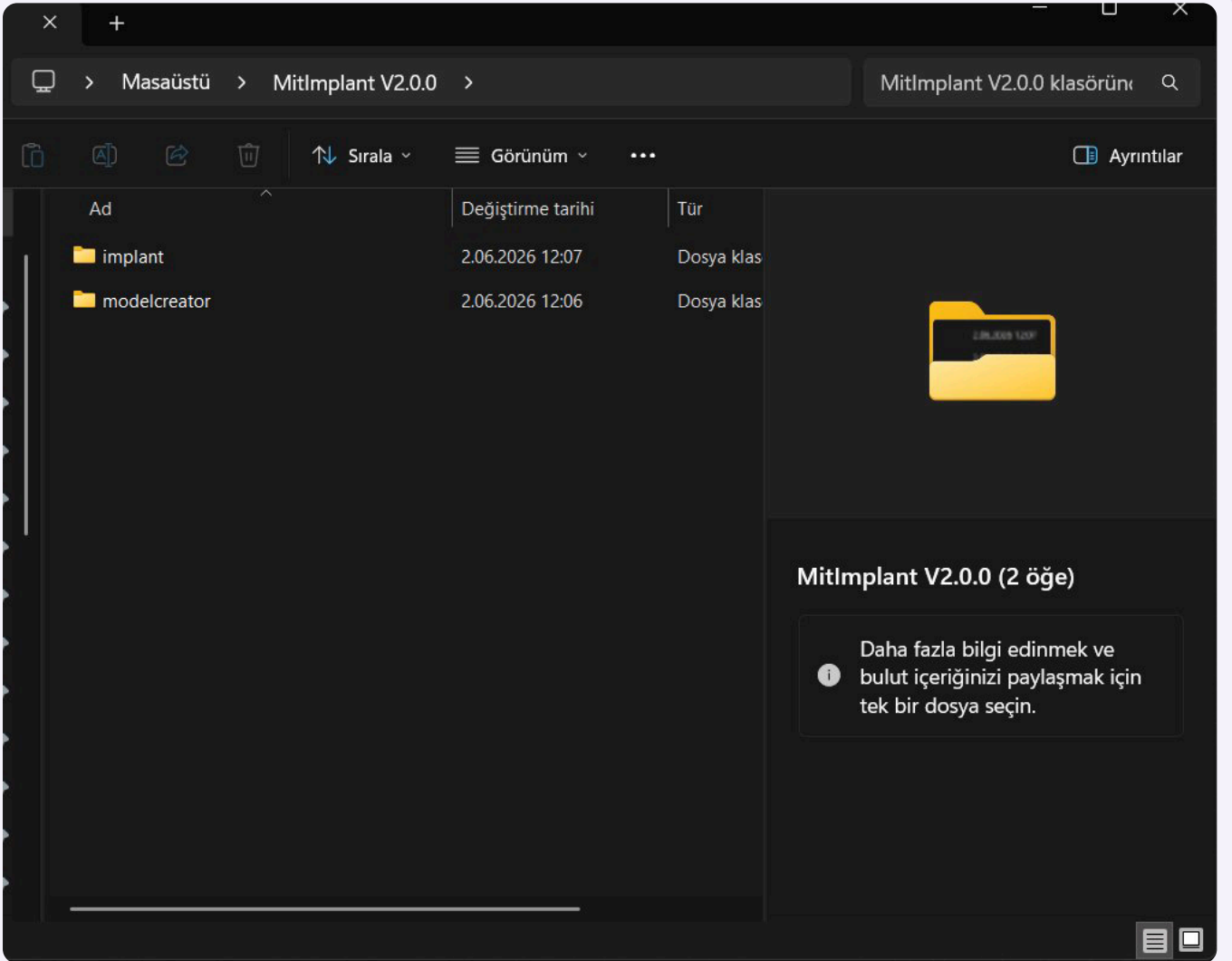

- MitImplant V2.0.0 klasörünün içeriği: **implant** ve **modelcreator** klasörleri


2

ADIM 2

implant klasörünü library içine aktarın

MitImplant V2.0.0 dosyasının içindeki **implant** klasörünü, Exocad'in kurulu olduğu dizinde bulunan **\DentalCADApp\library\implant** klasörünün içine aktarınız.

implant → \DentalCADApp\library\implant

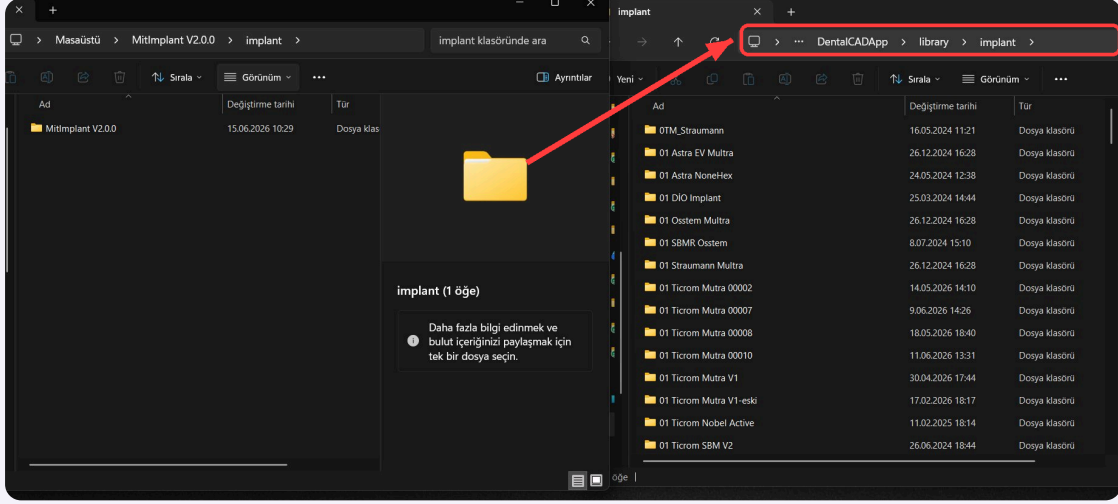

3


ADIM 3

implant klasörünü modelcreator içine aktarın

Aynı **implant** klasörünü, Exocad'in kurulu olduğu dizinde bulunan **\DentalCADApp\library\modelcreator\implants** klasörünün içine aktarınız.

* modelcreator klasörünün içinde **implants** klasörünün bulunduğundan emin olun ve yüklemeyi **implants** klasörünün içine yapın.


implant → \DentalCADApp\library\modelcreator\implants

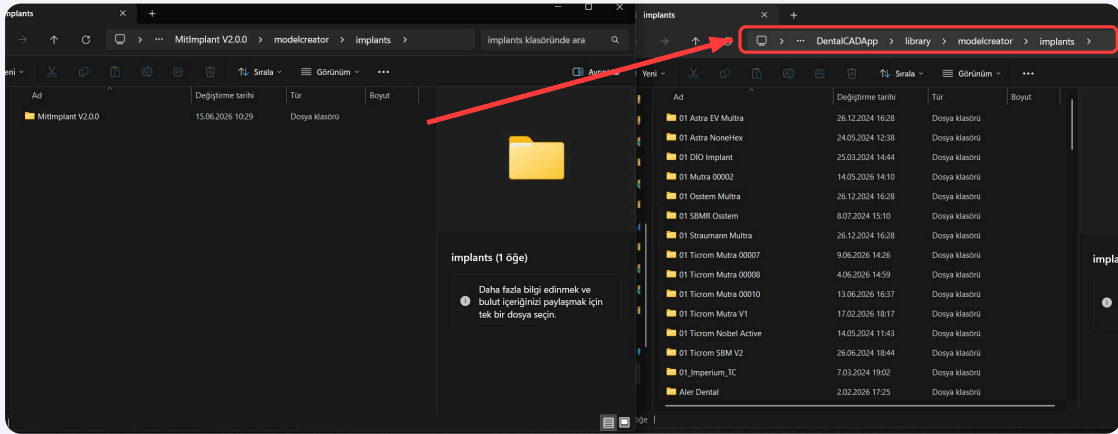

Uyarı

Kütüphane yüklemesi yaparken hiçbir klasörün ismini **değiştirmemelisiniz**. Aksi takdirde tasarım yaparken ya da model oluştururken Exocad içinde hatalar alabilirsiniz.

Kategori Seçimi

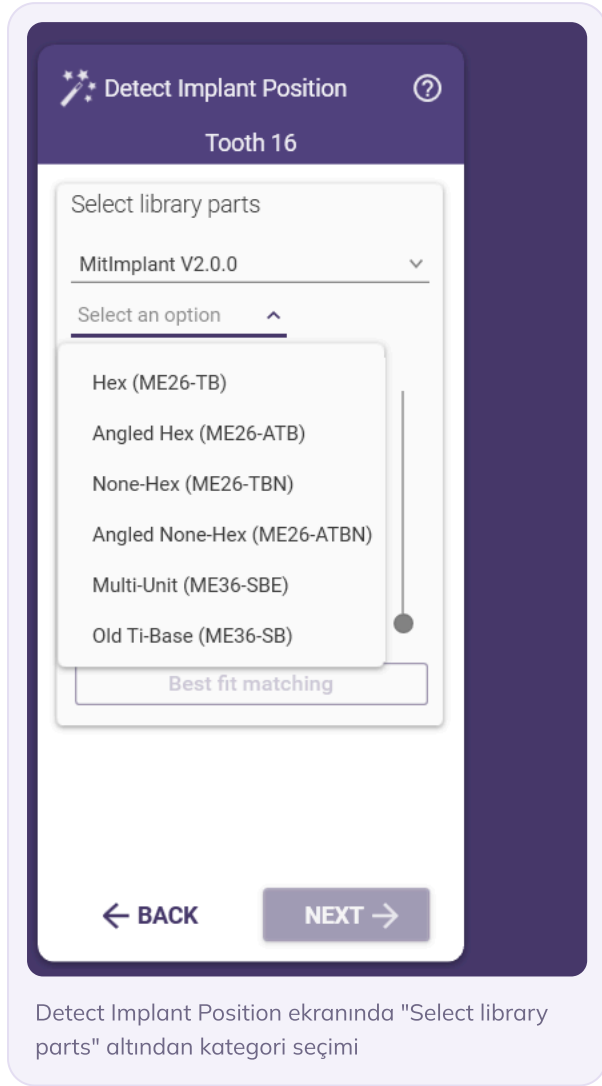


Ana kategoriler


MitImplant V2.0.0 kütüphanesinde **6 ana kategori** mevcuttur. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı buradan seçebilirsiniz.

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| 1 | Hex | ME26-TB |
| 2 | Angled Hex | ME26-ATB |
| 3 | None-Hex | ME26-TBN |
| 4 | Angled None-Hex | ME26-ATBN |
| 5 | Multi-Unit | ME36-SBE |
| 6 | Old Ti-Base | ME36-SB |

Hex Kategorisi ME26-TB

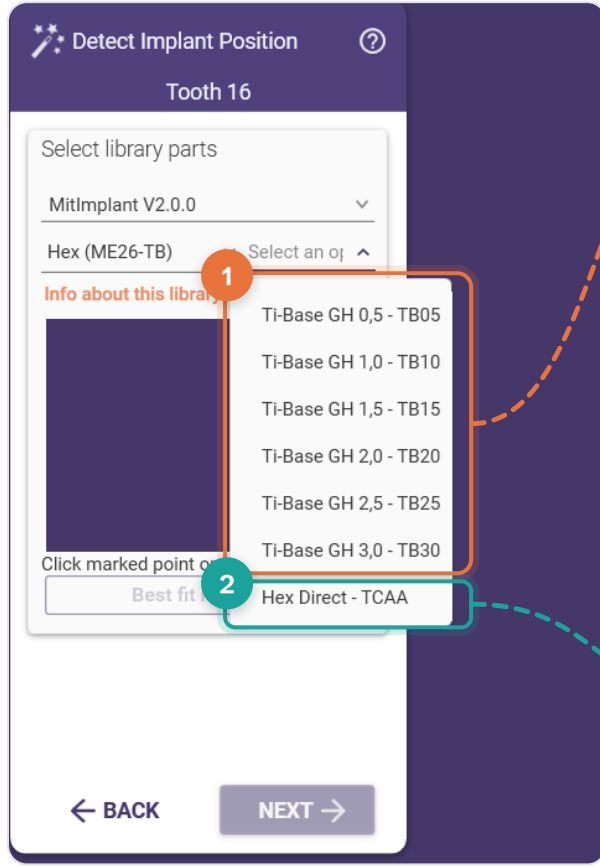

1 Ti-Base GH Seçenekleri

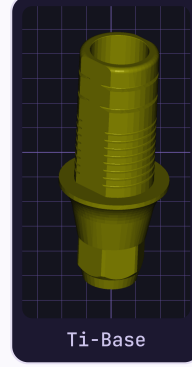


İmplant seviyesinde ve genellikle **tek üyelerde** kullanılacak Ti-Base seçimlerini bu kategoriden yapmanız gerekmektedir. Kategori içeriğinde farklı **GH (Gingival Height)** seçenekleri mevcuttur. Diş eti seviyesine göre uygun Ti-Base'i seçebilirsiniz.

2 Hex Direct - TCAA

"Hex Direct – TCAA" seçeneğinde Custom tasarımlarınızı yapabilirsiniz.


Hex (ME26-TB) seçildiğinde açılan Ti-Base GH ve Hex Direct seçenekleri

Angled Hex ME26-ATB

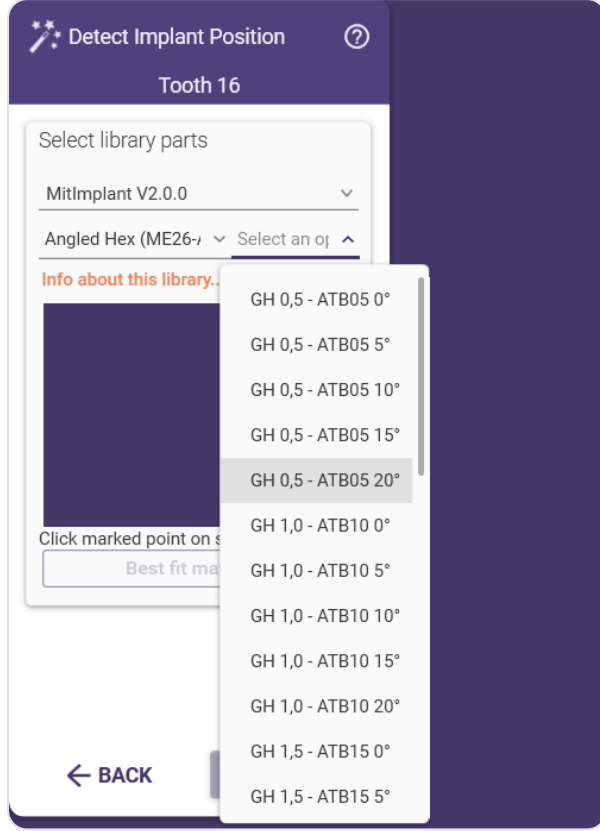

Angled Hex (ME26-ATB) seçildiğinde açılan GH ve Vida Açısı seçenekleri

Angled Hex

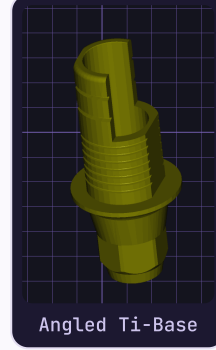

Angled seçeneklerinde hem **GH (Gingival Height)** hem de **Vida Açısı (Screw Angle)** seçeneği bulunmaktadır. Doğru GH ve doğru vida açısını belirleyerek tasarıma başlayabilirsiniz.

GH

Gingival Height


Diş eti seviyesi yüksekliği

SCREW ANGLE


Vida Açısı

Vida kanalı eğim açısı

None-Hex ME26-TBN

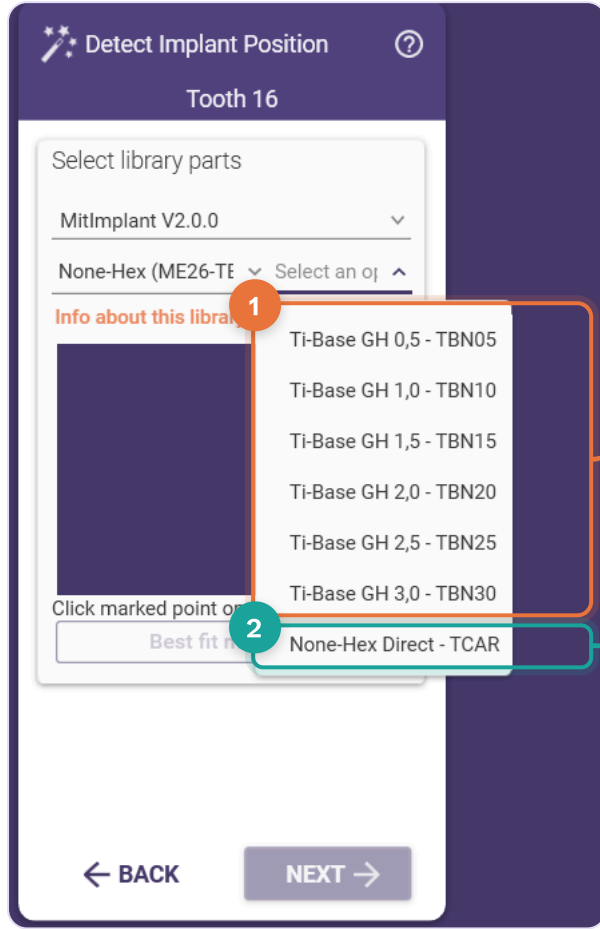

1 Ti-Base GH Seçenekleri

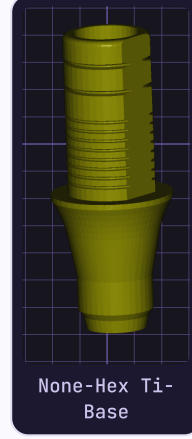


İmplant seviyesinde ve genellikle **çoklu üyelerde** kullanılacak Ti-Base seçimlerini bu kategoriden yapmanız gerekmektedir. Kategori içeriğinde farklı **GH (Gingival Height)** seçenekleri mevcuttur. Diş eti seviyesine göre uygun Ti-Base'i seçebilirsiniz.

2 None-Hex Direct - TCAR

"None-Hex Direct - TCAR" seçeneğinde Custom tasarımlarınızı yapabilirsiniz.


None-Hex (ME26-TBN) seçildiğinde açılan Ti-Base GH ve None-Hex Direct seçenekleri

Angled None-Hex ME26-ATBN

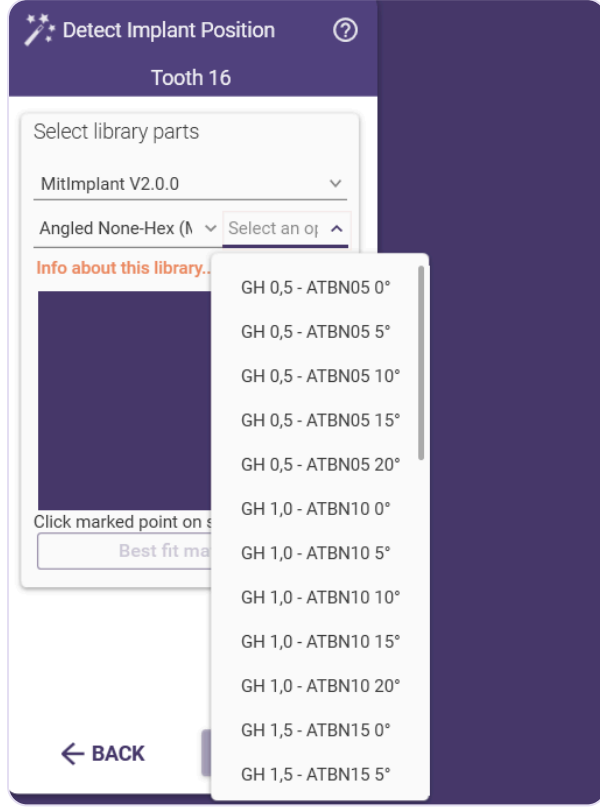

Angled None-Hex (ME26-ATBN) seçildiğinde açılan GH ve Vida Açısı seçenekleri

Angled None-Hex

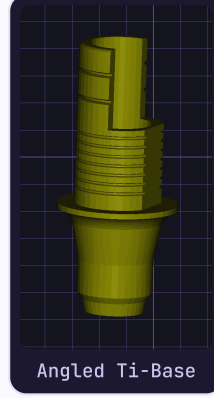

Angled seçeneklerinde hem **GH (Gingival Height)** hem de **Vida Açısı (Screw Angle)** seçeneği bulunmaktadır. Doğru GH ve doğru vida açısını belirleyerek tasarıma başlayabilirsiniz.

GH

Gingival Height

Diş eti seviyesi yüksekliği


SCREW ANGLE

Vida Açısı

Vida kanalı eğim açısı

Multi-Unit ME36-SBE


Multi-Unit seviyesi için kullanmanız gereken seçenek budur.

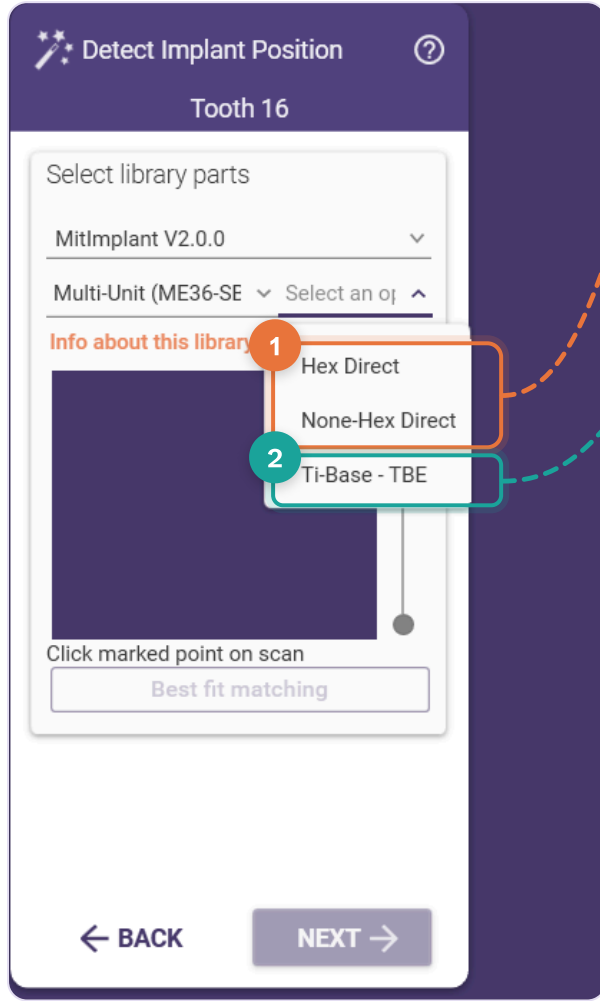

1 Hex Direct / None-Hex Direct

Multi-Unit üzerine **vidalı (direct)** iş yapmak için bu iki seçeneği kullanmanız gerekmektedir.

2 Ti-Base - TBE

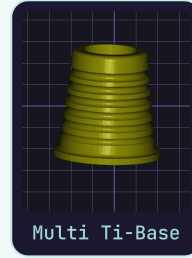

Multi-Unit üzerine **Ti-Base'li (Cap / Ring / Yüzük)** iş yapmak için bu seçenekten ilerlemeniz gerekiyor.

Multi-Unit (ME36-SBE) seçildiğinde açılan bağlantı seçenekleri